

## Istruzioni per l'uso

Leggere queste informazioni attentamente, perché si riveleranno utili per l'impiego corretto di HYLO COMOD®.

# HYLO COMOD®

Ialuronato di sodio 1 mg/ml

Per migliorare la lubrificazione della superficie oculare in caso di sindrome dell'occhio secco, bruciore o sensazione di presenza di corpo estraneo causati da condizioni ambientali o da interventi di oftalmochirurgia.

Collirio sterile senza fosfati e conservanti

### Cos'è HYLO COMOD®?

HYLO COMOD® è una soluzione sterile senza conservanti per uso oftalmico.

### Composizione:

1 ml HYLO COMOD® contiene 1 mg di ialuronato di sodio, acido citrico anidro, sodio citrato, sorbitolo e acqua per preparazioni iniettabili.

### Per cosa viene utilizzato HYLO COMOD®?

Per migliorare la lubrificazione della superficie oculare in caso di sindrome dell'occhio secco, bruciore o sensazione di presenza di corpo estraneo causati da condizioni ambientali o da interventi di oftalmochirurgia.

### Quando utilizzare HYLO COMOD®?


Il prurito, il bruciore, gli occhi che si stancano facilmente, la sensazione di sabbia negli occhi sono sintomi di un'insufficiente lubrificazione della superficie oculare. Questi sintomi, dovuti ad un inadeguato apporto di lacrime fisiologiche, possono manifestarsi, ad esempio, in ambienti asciutti o climatizzati o in seguito ad un prolungato lavoro al computer. Affinchè l'occhio rimanga in salute, è necessario lubrificarlo continuamente ripristinando il fisiologico film lacrimale con una lacrima artificiale.

La fisiologica secrezione delle lacrime può ridursi od alterarsi anche in caso di interventi chirurgici o in seguito a lesioni oculari. In tutti questi casi è consigliabile mantenere l'occhio intensamente umido utilizzando HYLO COMOD® per mantenere il fisiologico equilibrio di lubrificazione e idratazione dell'occhio. HYLO COMOD® contiene il sale di sodio dell'acido ialuronico, una sostanza naturale presente all'interno dell'occhio ma anche in altre parti del corpo. Il sodio ialuronato possiede la peculiarità di formare sulla superficie dell'occhio una pellicola umettante uniforme e duratura, che non viene rapidamente eliminata. HYLO COMOD® può essere utilizzato senza problemi durante la giornata perchè non causa annebbiamento della vista proteggendo a lungo gli occhi dalla secchezza e dall'irritazione.

Ciò è particolarmente importante se si utilizzano lenti a contatto, in quanto, per non causare alcun fastidio, queste ultime devono essere immerse in sufficiente liquido lacrimale. È possibile utilizzare HYLO COMOD® mentre si indossano lenti a contatto. L'utilizzo di lenti a contatto sarà più confortevole durante l'utilizzo di HYLO COMOD® perché mantiene una adeguata lubrificazione evitando la formazione di incrostazioni o residui. HYLO COMOD® è privo di conservanti, pertanto generalmente è ben tollerato. Inoltre, HYLO COMOD® non contiene fosfati, evitando così eventuali problematiche quali residui nella cornea.

### Come applicare HYLO COMOD®?

Utilizzare HYLO COMOD® solo se la confezione esterna è sigillata e intatta prima del primo utilizzo (☞).

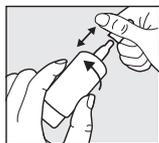

**Figura 1:**

Rimuovere il tappo prima dell'uso. Per rimuovere il tappo, tenerlo fermo con una mano e con l'altra, ruotare il flacone portando verso il basso. Prima della prima applicazione, capovolgere il flacone con il contagocce verso il basso e premere sul fondo del flacone per far uscire la prima goccia dal contagocce. Il flacone ora è pronto all'uso per le successive applicazioni.



**Figura 2:**

Mantenere il flacone capovolto posizionando il pollice sulla parte superiore del flacone e le altre dita sul fondo dello stesso.



**Figura 3:**

Sostenere con la mano libera, la mano che regge il flacone.




**Figura 4:**

Quando si utilizza il collirio evitare qualsiasi contatto tra la punta del flacone e l'occhio o la pelle.

Piegare leggermente la testa all'indietro, premere rapidamente ed energicamente sul fondo del flacone. Si aziona così il meccanismo per il rilascio di UNA goccia.

Grazie allo speciale meccanismo di valvole del Sistema COMOD®, le dimensioni e la velocità di fuoriuscita di una goccia sono sempre le stesse, indipendentemente dalla pressione applicata.

Chiudere lentamente gli occhi per permettere al fluido di diffondersi sulla superficie dell'occhio.

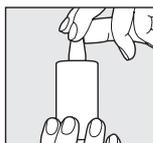

**Figura 5:**

Dopo l'uso, richiudere immediatamente il flacone con il tappo, assicurandosi che non vi siano residui di liquido sul contagocce.

In caso di dubbi sul corretto utilizzo di questo prodotto, la preghiamo di rivolgersi al fabbricante.

Un flacone contenente 10 ml di soluzione corrisponde a circa 300 gocce. Per ragioni tecniche, una piccola quantità di soluzione rimane sempre nel flacone al termine dell'uso.

È possibile utilizzare HYLO COMOD® per un periodo di tempo illimitato.

Il flacone di HYLO COMOD® è strettamente personale, non consentirne l'uso da parte di altre persone.

### Quali altre informazioni è necessario sapere?

Se con l'utilizzo nota un peggioramento o non nota miglioramenti si rivolga al medico o al farmacista.

Se si usa un qualsiasi altro collirio, attendere almeno 30 minuti tra le applicazioni e usare sempre HYLO COMOD® per ultimo. Gli unguenti per gli occhi devono essere sempre applicati successivamente a HYLO COMOD®.

Per l'assenza di conservanti, HYLO COMOD®, è ben tollerato anche se utilizzato per un periodo di tempo prolungato. In casi molto rari sono state segnalate reazioni avverse come ipersensibilità, bruciore o lacrimazione eccessiva, dolore, sensazione di corpo estraneo o altre irritazioni locali temporanee che si sono interrotte immediatamente con la sospensione dell'uso di HYLO COMOD®.

Successivamente all'applicazione di HYLO COMOD® è possibile un momentaneo offuscamento della vista dovuto alla viscosità del collirio. In casi molto rari ciò può causare un temporaneo mal di testa in pazienti sensibili.

HYLO COMOD® può essere applicato anche quando si indossano lenti a contatto. Per evitare eventuali reazioni di incompatibilità a causa di possibili interazioni tra i prodotti per la cura delle lenti a contatto e HYLO COMOD® si consiglia, dopo l'applicazione delle lenti a contatto, di attendere circa 30 minuti prima di applicare il collirio.

Allo stato delle attuali evidenze HYLO COMOD® può essere utilizzato in età pediatrica, in gravidanza e durante l'allattamento.

Nel caso in cui si sia verificato un incidente grave durante l'uso di questo dispositivo medico o in conseguenza al suo utilizzo, si prega di segnalarlo al fabbricante (☛).

**Frequenza e durata dell'utilizzo di HYLO COMOD®**

Generalmente, si applica una goccia di HYLO COMOD® tre volte al giorno in ogni occhio.

Se i suoi disturbi persistono o se ha necessità di usare HYLO COMOD® più frequentemente, si rivolga al suo oculista o farmacista.

**Quando non utilizzare HYLO COMOD®?**

Non usare HYLO COMOD® in caso di ipersensibilità a uno dei componenti.

**Informazioni necessarie sulla conservazione di HYLO COMOD®**

Non conservare a temperatura superiore ai 25°C (4°).

HYLO COMOD® può essere utilizzato per 6 mesi dopo la prima apertura.

Non utilizzare dopo la data di scadenza (5).

**Tenere lontano dalla portata dei bambini.**

Smaltire questo dispositivo medico in conformità alla normativa locale. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

**Sono disponibili le seguenti confezioni:**

Collirio da 10 ml

Collirio da 5 ml "Campione gratuito vietata la vendita"

**Data di revisione del testo:**

Aprile 2022

**Fabbricante (M)**

URSAPHARM Arzneimittel GmbH

Industriestraße 35

66129 Saarbrücken

Germania

**Distributore parallelo:**

GMM Farma S.r.l. – via Lambretta, 2 20054 Segrate (MI)

**Riconfezionato nell'officina indicata con l'ultima lettera accanto al numero di lotto:**

Ⓢ GXO logistics pharma italy s.p.a. - via Amendola, 1 20049 Caleppio di Settala (MI)

Ⓛ Columbus Pharma S.R.L., Via dell'artigianato 1, 20032 Cormano (MI)

CE 0197

STERILE A

Dispositivo medico